

Pflegeanleitung

Beachten Sie bitte, dass


- > Sie die Maske regelmäßig täglich reinigen, indem Sie diese in heisses Wasser (ca. 50° C) unter Zugabe von etwas gelöster Kernseife legen und dort für einen Zeitraum von etwa 5 - 10 Minuten belassen. Anschließend handwarm abspülen und trocknen lassen!
- > zur Desinfektion "Dibromol farblos" geeignet ist (erhältlich in der Apotheke). Sie sollten die Maske für 30 Minuten in die unverdünnte Lösung legen und hinterher gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
- > wenn Sie Ihre Maske desinfizieren oder mit heißem Wasser reinigen möchten, Sie bitte unbedingt die harte Acrylschale und den Konnektor samt Tubusverlängerung entfernen!
- > jegliche Behandlung mit scharfen Gegenständen der Maske schadet!
- > Sie die Maske mit einer eingebauten Schale nie knicken sollten!
- > **auf keinen Fall an der Maske manipuliert werden darf, da sonst der Gewährleistungsanspruch entfällt.**

Wenn Sie all diese Hinweise beachten werden Sie lange Freude an der Maske haben.

Schlafen Sie gut!



überreicht durch:

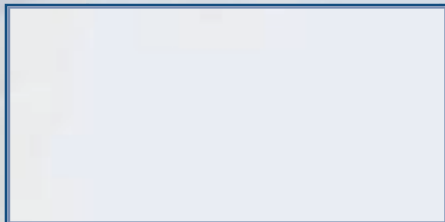

www.lab-air.com

lab air

Gebrauchsanweisung Beatmungsmaske



www.lab-air.com

Sicherheitshinweise

- > Bitte lesen Sie diese Produktinformation sorgfältig.
- > Nehmen Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit, keine Veränderungen an der Maske vor.
- > Reinigen Sie die Maske und die dazugehörigen Komponenten (Schläuche, Kopfband, Konnektor) regelmäßig.
- > Bei Fragen oder Unklarheiten rufen Sie bitte den Lieferanten an.

Tragemöglichkeiten



Die Schlauchführung kann nach eigenem Belieben vorgenommen werden.

Anlegen der Bänder

WICHTIG! Von den drei Befestigungsbändern ist ein seitliches Band (siehe Bild unten) mit einem Clip versehen, der in einigen Fällen eine große Öse hat. Dies dient zum erleichterten Aushaken des Bandes.



Clip mit der Öse über Kunststoffpils legen

Zur Reinigung des Kopfbandes (Handwäsche) bitte die Klettverschlüsse des Bandes geschlossen lassen. Vor der Wäsche alle Kunststoffteile entfernen sowie evtl. Markierung zur Längeneinstellung anbringen (z.B. Abnäher).

Sollte die Elastizität des Bandes nach regelmäßigen Gebrauch stark nachlassen, rufen Sie uns bitte an und bestellen Ersatz.

Reinigung und Demontage

Der Doppeldrehkonnektor kann zur Reinigung aus der Maske gezogen werden. Leichte seitliche Bewegung erleichtert das Herausziehen.

Bitte nicht mit Gewalt herausziehen!

Bei Montage sollte der Doppeldrehkonnektor bis zur schwarzen Markierung in die Maske eingeführt werden.



Demontage des Ausatemventils

zur Maske ← Ventil → zum Gerät



Alle Verbindungen im Schlauchsystem sind nur zusammengesteckt und können demontiert werden.

Ersatzteile



Kopfbandclip



Doppeldrehkonnektor



Gänsegurgel



Acrylteil zum Befestigen des Kopfbandes

Jede Maske ist eine individuelle Anfertigung. Es kann daher sein, dass nicht jedes der oben abgebildeten Teile an jeder Maske vorhanden ist. Im Zweifelsfall rufen Sie bitten den Lieferanten an.